

	CHAPITRE : GCS/C/C2 ACCUEIL DES PATIENTS ET PRELEVEMENTS	
GCS Laboratoire Epinal - Remiremont	BONNES PRATIQUES DE PRELEVEMENT DES TUBES QUANTIFERON	REFERENCE : GCS/C/C2/INS18 VERSION 1
Date d'application : 2022-04-21		

- **Lors du prélèvement vous devez prélever les tubes dans l'ordre suivant :**



Le remplissage est en l'absence de vide donc lent.

En cas de prélèvement avec une unité à ailettes, utiliser un tube de purge.

- **Remplir les tubes jusqu'à cette limite**



Petit rectangle noire qui indique le niveau correct de remplissage.

Nb : les tubes se remplissent plus doucement que des tubes classiques !

- **IMPORTANT :**

Après le prélèvement, **faire 10 retournements doux** de chaque tube et s'assurer que toute la paroi interne du tube est tapissée de sang.

Transport dans les 12 heures au laboratoire : pas de transport par pneumatique. Garder les tubes à température ambiante.

A maintenir en position debout en attendant le transport.

Rédaction : LEON ANTHONY	Vérification : MOUGINOT Manon	Validation : THIERY EMILIE 2022-04-05	Approbation : DUVAL VERONIQUE 2022-04-06	Page 1 / 1 Edité le :1er août 2022
------------------------------------	---	--	--	--