

	<p>CHAPITRE : GCS/C/C2 ACCUEIL DES PATIENTS ET PRELEVEMENTS</p>	
<p>GCS Laboratoire Epinal - Remiremont</p>	<p>CHOIX DU MATERIEL ET DELAI D'ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS URO-GENITAUX</p>	<p>REFERENCE : GCS/C/C2/INS11 VERSION 5</p>
<p>Date d'application : 2023-04-26</p>		

Examen demandé	Origines	Matériel recommandé à privilégier	Délai d'acheminement	Matériel dérogatoire	Délai d'acheminement
Prélèvement génital standard chez la femme	Vaginal Endocol Vulve	 Kit E-Swab "rose"	24H T° ambiante	 Kit E-Swab "orange"	24H T° ambiante
Dépistage de StreptoB Par biologie moléculaire	Vaginal	 Kit E-Swab "rose"	48H T° ambiante	 Kit E-Swab "orange"	48H T° ambiante
Prélèvement génital standard chez l'homme	Urétral Gland	 Kit E-Swab "orange"	24H	 Ecouvillon fin au Dacron	5H
Herpès et/ou VZV	Génital Cutané	 Milieu pour recherche virale	24H T° ambiante	 Kit E-Swab (rose ou orange)	24H T° ambiante

<p>Rédaction : DUVAL VERONIQUE</p>	<p>Vérification : DELIGNE Delphine</p>	<p>Validation : THIERY EMILIE 2023-04-11</p>	<p>Approbation : LEON Anthony 2023-04-11</p>	<p>Page 1 / 2 Edité le :13 avril 2023</p>
---	---	---	---	---

Examen demandé	Origines	Matériel recommandé à privilégier	Délai d'acheminement	Matériel dérogatoire	Délai d'acheminement
<i>Chlamydiae trachomatis</i> et Gonocoque Par biologie moléculaire	Génital (PV, endocol, autoprélèvement)	 Milieu GenExpert	60J T° ambiante	 Kit E-Swab "rose"	48H T° ambiante
	Urinaire 1er jet (homme +++)	 Mini 10 mL	24H T° ambiante	/	/
<i>Mycoplasma genitalium</i> : (Sur prescription spécifiée) - Par biologie moléculaire	Génital	 Milieu GenExpert	60J T° ambiante	 Kit E-Swab "rose"  Milieu Σ-Transwab®	48H T° ambiante
	Urinaire 1er jet (homme +++)	 Mini 10 mL	24H T° ambiante	/	/



Merci de prélever un tube adapté pour chaque examen demandé afin d'avoir une quantité suffisante de prélèvement pour analyse.